


Sådan bruger du Yellowone Handsafe™


NB: Fjern venligst sikkerhedsklistermærket på forsiden af produktet inden det tages i brug.

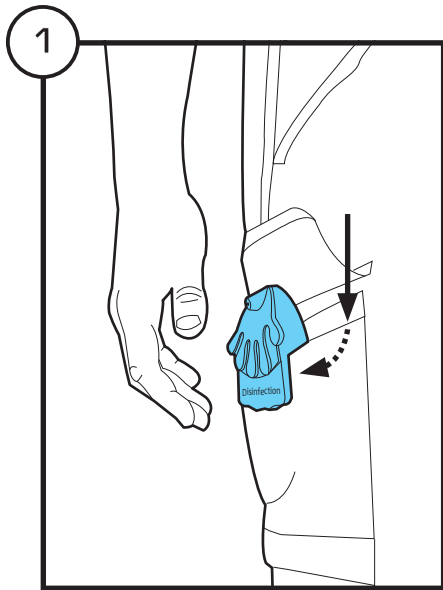

Yellowone Handsafe bæres på ydersiden af kittel- eller bukselommen.

Placer det i din kittel-/ bukselomme ved at køre dispenser-toppen langs kanten af beklædningen til modsatte side for at "låse" den på plads ved hjælp af indstøbte modhagere på indersiden.


Dispenseren kan også hægtes på bæltetasker, bæltter, muleposer og lommer på rygsæk til privat brug.

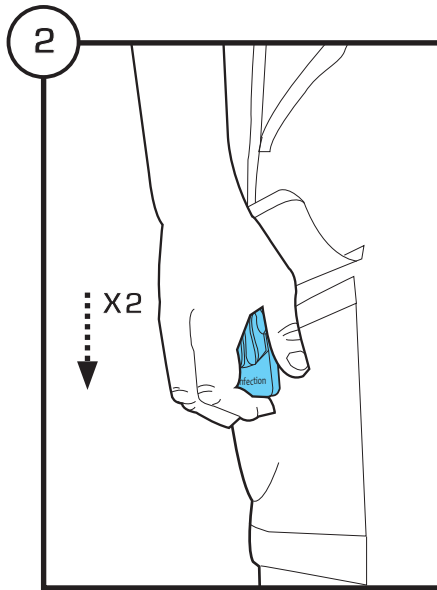

Den betjenes med en hånd.

Placer den øverste del af håndfladen på toppen og fingrene i klipsens indhak - tryk derefter **hurtigt to gange** lige efter hinanden for at dispensere gelen midt i håndfladen.

Du skal anvende mindst 2 pump (=3 ml) hver gang, du udfører håndhygiejne.

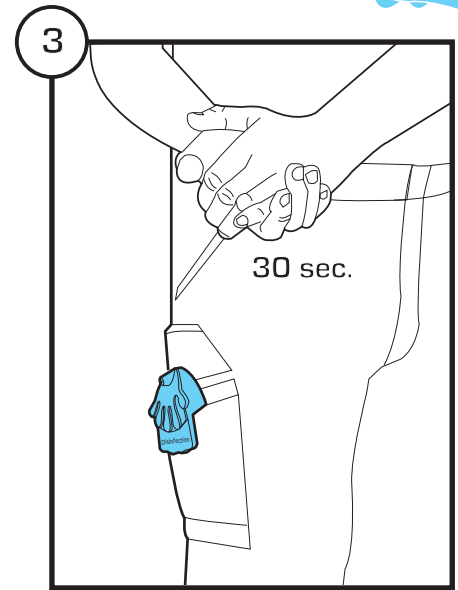

Desinfektionsmidlet fordeles og indgrides i hænder og håndled i ca. 30 sekunder og til tørhed opnås.

Online videoinstruktion:

<https://www.youtube.com/watch?v=S9P5MWxDPfI>

Vær opmærksom på ikke at forurene dispenseren under brug. Dispenseren skal rengøres en gang dagligt ved hjælp af en spritserviet eller under rindende vand og opbevares rent og tørt, når den ikke er i brug. Håndspritten, der anvendes i dispenseren er i gelform og indeholder 85% v/v alkohol. Produktet er godkendt i henhold til europæisk standard og anvendes som standardprodukt på de danske sygehuse og primærsektor. Dispenseren er til éngangsbrug pga. produkt- og patientsikkerhed og kan genanvendes ved at smide den i container for plastikaffald efter brug.



For mere info kontakt venligst:

Hân Pham: han@yellowone.dk • +45 61713554 • www.yellowone-handsafe.com

Made in Denmark